



*mobile*seat XE

EXTENDED MASSAGE CUSHION



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку
Ogawa Mobile Seat XE

Пожалуйста перед использованием массажера
внимательно прочитайте данную Инструкцию.
Сохраните инструкцию для будущего обращения
к ней в случае возникновения вопросов.

Содержание

Меры безопасности	3 - 4
Составные части	5
Пульт управления	6
Подготовка к эксплуатации	7
Порядок эксплуатации	8- 10
Обслуживание и ремонт	11
Устранение проблем	12
Спецификация	13
Контактная информация	14

Меры безопасности

а) Условия использования

- Не используйте массажную накидку в помещении с высокой влажностью или повышенным уровнем содержания пыли, это может привести к выходу ее из строя или поражению электрическим током.
- Не используйте накидку в ванной комнате.
- Не ставьте и не храните накидку там, где она может быть подвергнута воздействию воды. Храните ее в сухом безопасном месте.
- Не подвергайте накидку воздействию нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.

б) Ограничения по использованию

Если у вас имеются проблемы со здоровьем или вы относитесь к одной из нижеперечисленных групп, проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием массажной накидки.

- Если вы страдаете от болезней сердца
- В период беременности
- Если вы обеспокоены вашим здоровьем.

в) Противопоказания к использованию

- Если время использования накидки 15 минут за сеанс.
- Массажная накидка не должна использоваться детьми или инвалидами без присмотра взрослых.
- Не используйте накидку перед сном.
- Если тканевое покрытие накидки разорвано.
- Если на накидку пролилась жидкость.
- Если во время массажа ощущается сильная боль.
- Если накидка неисправна или работает неправильно.
- Если во время работы накидки произошло короткое замыкание.

г) Важные предупреждения

- Отключайте накидку от сети, если она не используется.
- Не используйте дополнительное оборудование, не рекомендованное OGAWA.
- Никогда не используйте накидку, если сетевой шнур или вилка повреждены. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр OGAWA для определения неисправности и ремонта.
- Никогда не роняйте и не пытайтесь засунуть посторонние предметы в вентиляционные отверстия массажной накидки.

-
- Во время работы поверхность массажной накидки нагревается. Если у вас имеются нечувствительные участки кожи или плохое кровообращение, остерегайтесь перегрева. Неконтролируемое использование тепловой функции детьми или недееспособными лицами может быть опасным.
 - Не поднимайте и не переносите накидку с подключенным к сети шнуром питания.
 - Накидка предназначена только для домашнего использования.
 - Не накрывайте массажную накидку во время работы.
 - Не допускайте чрезмерного давления или резких сгибаний корпуса массажной накидки.

д) Указания по технике безопасности

Пожалуйста, заранее прочитайте эти указания по безопасности.

- Массажная накидка не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими и сенсорными способностями, а также с психическими расстройствами, или лицами, которым не хватает опыта и знаний о накидке. В этом случае массаж должен выполняться в присутствии лиц, ответственных за их безопасность.
- Непрерывное использование массажной накидки может привести к ее перегреву и выключению. Если это произошло, немедленно прекратите массаж и дайте накидке остыть.
- Во время использования допускается некоторый уровень шума, который издается из-за существующей вибрации.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием накидки, если вы находитесь под действием лекарств или больны. Не используйте накидку, если вы плохо себя чувствуете.
- Недопустимы резкие перепады температуры в помещении, где используется массажная накидка.
- Если накидка хранилась в прохладном или теплом помещении, сделайте паузу 3 часа перед началом ее использования.
- Не разбирайте накидку. Это может привести к ее неисправности или поражению электрическим током.
- Не касайтесь кабеля питания мокрыми руками.
- Не используйте массажную накидку, если электрическая розетка неисправна или оголена.


Составные части

- а) Спинка
- б) Съемная дополнительная накидка
- в) Сетевой провод питания
- г) Массажные ролики
- д) Сиденье
- е) Карман пульта дистанционного управления
- ж) Пульт дистанционного управления
- з) Вибрационный мотор
- и) Адаптер питания
- к) Адаптер питания от автоприкуривателя



Пульт управления

Назначение кнопок

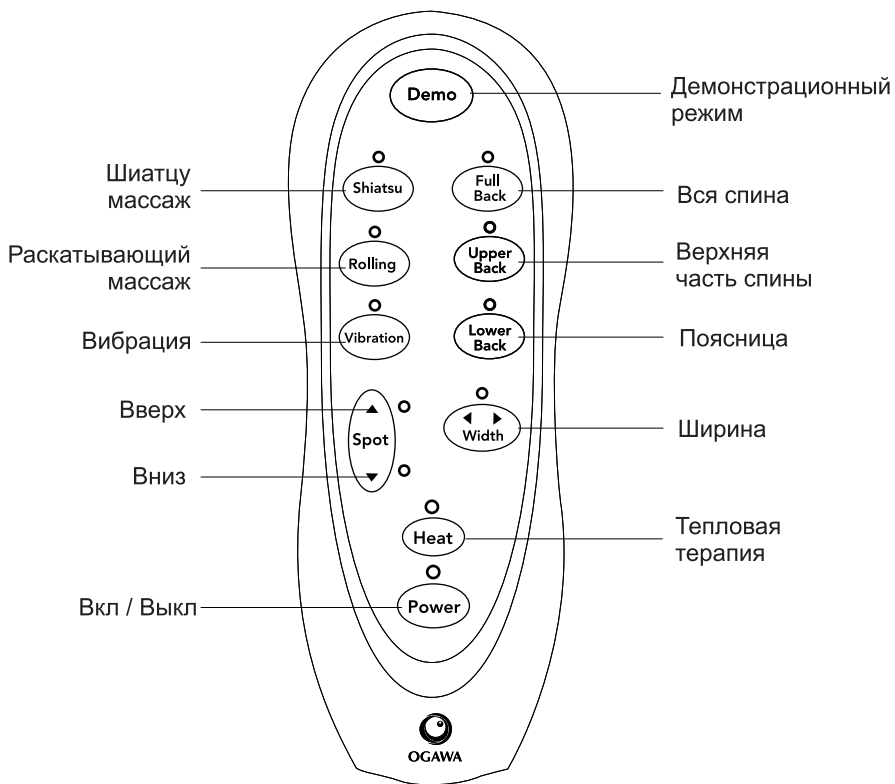

Подготовка к эксплуатации

Подготовка к использованию

1. Перед использованием массажной накидки

- Массажная накидка имеет предохранительный винт, расположенный на задней стороне спинки, который защищает массажный механизм во время транспортировки. Он должен быть вывернут перед использованием.
- Для этого используйте прилагаемый в комплекте гаечный ключ.

2. Размещение массажной накидки

- Массажная накидка оснащена сзади ремнем, который позволяет пользователю жестко крепить ее на стуле или кресле.
- Разместите накидку на кресле, соединив два конца крепежных ремней за спинкой кресла и закрепив их на липучке.

3. Съёмная дополнительная накидка

- Съёмная накидка предназначена для смягчения массажа.
- Снимите эту накидку, если вы предпочитаете более интенсивный массаж.

Порядок эксплуатации

1. ВКЛ / ВЫКЛ [On / Off]

Вставьте вилку в розетку. Включите питание. Если массажные ролики спины в нижнем положении, кнопка "On / Off " начнет мигать и ролики автоматически вернуться в исходное положение. Для включения массажа, нажмите кнопку "On / Off " один раз и выберите одну из автоматических программ. Сеанс массажа рассчитан на 15 минут. После этого все функции будут остановлены. Нажмите кнопку "On / Off " еще раз для полного отключения массажа. При этом все индикаторы на пульте погаснут и кнопки перестанут работать. Массажные ролики автоматически вернуться в исходное положение.

2. Демонстрационный режим [Demo]

Нажмите кнопку "Demo" один раз, и накидка автоматически начнет демонстрировать все функции массажа. Массажная накидка перестанет работать после выполнения демопрограммы.

3. Шиатцу [Shiatsu]

Нажатие кнопки "Shiatsu" включает разминающий массаж Шиатцу.

4. Вверх / Вниз [Spot Up] / [Spot Down]

Кнопки "Spot Up" / "Spot Down" обеспечивают перемещение роликов в режиме массажа Шиатцу для массажа отдельно выбранной части спины. При нажатии кнопки "Spot Up" массажные ролики движутся вверх. При отпускании кнопки "Spot Up" передвижении роликов прекращается. При нажатии кнопки "Spot Down" массажные ролики движутся вниз. При отпускании кнопки "Spot Down" передвижении роликов прекращается.

5. Раскатывающий [Rolling] массаж

Нажмите кнопку [Rolling] для включения раскатывающего массажа который будет выполняться вдоль всей спины.

Порядок эксплуатации

6. Ширина [Width]

Функция "Width" начинает работать при включенном "Rolling" раскатывающем массаже. При выполнении раскатывающего массажа нажмите кнопку "Width" один раз, при этом размещение роликов будет изменяться на другую ширину.

7. Вся спина /Верхняя часть /Поясница [Full] /[Upper] /[Lower]

Данная функция работает только при включенном Шиатцу или Раскатывающем массаже. При включенной кнопке "Shiatsu" или "Rolling", нажмите кнопку "Full", чтобы включить полный массаж всей спины сверху вниз. Нажмите "Full" еще раз, чтобы остановить эту функцию. При нажатии кнопки "Upper", ролики будут массировать только верхнюю часть спины. При нажатии кнопки "Lower", ролики будут массировать только поясницу.

8. Вибрация [Vibration]

Нажмите кнопку "Vibration", чтобы включить вибрационный массаж в области сиденья. Первое нажатие на кнопку включает массаж с низкой интенсивностью, второе нажатие включает массаж со средней интенсивностью и третье с высокой интенсивностью вибрации. Четвертое нажатие на кнопку останавливает функцию вибрационного массажа.

9. Тепловая терапия [Heat]

Функция тепловой терапии "Heat" включается в режимах "Full", "Lower" и "Upper". При этом массажные ролики спины будут нагреваться.

10. Остановка всех функций массажа

Нажмите кнопку "On /Off" после окончания массажа и массажные ролики вернутся в исходное положение. Не отключайте накидку из розетки, пока ролики передвигаются в исходное положение или если кнопка "On /Off" еще мигает.

Функциональные возможности

1. Раскатывающий и Шиатцу виды массажа спины предоставляются в автоматическом режиме для программ Full, Upper и Lower.
2. Функция разминающего Шиатцу массажа имеет возможность настройки точки массажа по индивидуальному желанию пользователя и способствует расслаблению мышц спины.
3. Вибрационный массаж в области сиденья имеет 3 уровня интенсивности и служит для облегчения напряжения мышц нижней части тела .
4. Функция тепловой терапии увеличивает эффект воздействия Шиатцу и Раскатывающего массажа и улучшает циркуляцию крови.
5. Легкий, эргономичный и компактный дизайн.
6. Простой в использовании пульт дистанционного управления.
7. Автоматическое отключение массажа через 15 минут
8. Светодиодные индикаторы выполняемых функций.

Эффект от использования массажной накидки

1. Снимает мышечные боли
2. Снимает нервное напряжение и стресс
3. Улучшает кровообращение

Окончание работы

Нажмите кнопку "On / Off " после использования массажной накидки и она прекратит работу. Массажные ролики вернуться в исходное положение. Отключите массажную накидку от электрической сети.

Обслуживание и ремонт

Порядок хранения

- Храните массажер в упаковке или в безопасном, сухом и прохладном месте.
- Храните массажер вдали от острых поверхностей или заостренных предметов, которые могут порезать или проколоть тканевую поверхность массажной накидки.
- Чтобы избежать поломки, не сгибайте и не обматывайте шнур питания вокруг массажной накидки.
- Не складывайте массажную накидку вместе с адаптером питания.

Порядок чистки

- Во время чистки, избегайте любого контакта накидки с водой или другой жидкостью .
- Отключите накидку и дайте ей остыть перед очисткой.
- Очищайте накидку только мягкой и слегка влажной губкой.
- Держите накидку вдали от воды или каких-либо жидкостей.
- Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, полироль стекол и мебели или растворитель для краски для очистки накидки.

Важные предупреждения

- Не опирайтесь на роликовый массажный механизм при изменении своего положения тела, чтобы избежать разрывов на тканевой поверхности массажной накидки.
- Не рекомендуется использовать массажную накидку на деревянных поверхностях, так как она может повредить дерево.
- Не допускайте чрезмерного давления на накидку во избежании поломки или получения травм.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать массажную накидку. Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром OGAWA для необходимого ремонта.

Устранение проблем

Эта массажная накидка управляется с помощью встроенного микропроцессора, который восприимчив к скачкам напряжения в пределах +10% и -15%. Вследствии этого, накидка может некорректно работать и иметь следующие неполадки:

Неполадки в работе	Решение данной проблемы
Накидка не включается	<ul style="list-style-type: none">• Отсутствует электричество в сети. Используйте накидку после его восстановления.• Снова подключите блок питания.• Включите переключатель питания на пульте
При включении функции обогрева массажные ролики не загораются и не нагреваются	<ul style="list-style-type: none">• Перед нажатием кнопки "Heat" нажмите кнопку "Full" / "Upper" / "Lower" на пульте.
Во время массажа пульт работает, а массажная накидка нет.	<ul style="list-style-type: none">• Массажная накидка может перегреться после продолжительного использования. Она должна будет автоматически возобновить свою работоспособность после того как остынет. Пожалуйста, выключите питание и дайте массажной накидке остыть в течении 30 - 50 минут.
Массаж спины не включается	<ul style="list-style-type: none">• Снова подключите блок питания.• Включите переключатель питания на пульте
Не включается вибрация сиденья	<ul style="list-style-type: none">• Включите кнопку вибрации "Vibration".• Снова подключите блок питания.
Массаж внезапно остановился	<ul style="list-style-type: none">• Внезапно пропало электричество в сети. Используйте накидку после его восстановления.• Снова подключите блок питания.

Спецификация

Наименование	Ogawa Mobile Seat XE
Модель	OZ 0918
Напряжение питания	АС 100-240В, DC 12В
Частота	50-60 Гц
Мощность	60 Вт
Таймер	15 минут
Габаритные размеры	760(Д) x 165(Ш) x 470(В) мм
Вес	Нетто: 4,65 кг Брутто: 5,65 кг
Условия использования	Температура: 10°C - 40°C
	Относительная влажность: 30RH-85RH
Условия хранения	Температура: 20°C - 60°C
	Относительная влажность: 30RH-85RH
Функции безопасности	Накидка оборудована защитой от перегрева и скачков напряжения
Эффект от использования	Улучшает циркуляцию крови Снимает мышечные боли Снимает нервное напряжение и стресс

Контактная информация



MALAYSIA
Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : +603-5125 4286
Fax: +603-5121 4386



HONG KONG, CHINA
OGAWA Health Care International (HK) Ltd
Room 3&5, 7/F International Trade Centre
11-19 Sha Tsui Road
Tsuen Wan
Hong Kong
Tel :+85 2 2428 8823
Fax:+85 2 2410 0119



SINGAPORE
OGAWA Health-Care Pte Ltd
17 Kaki Bukit Road 2
K. B. Warehouse Complex
Singapore 417846
Tel : +065-6846 8588
Fax: +065-6846 7677



SHANGHAI, CHINA
OGAWA (SHANGHAI)
Health-Care Equipment Co. Ltd
Block B 2903, Dazhong Jinrong Plaza
1023 West Yan'an Road, Zhangning
District,
Shanghai, China P.R.C. 200050
Tel : +86 021-6212 0981
Fax: +86 021-6212 2856



AUSTRALIA
OGAWA International (AUST) Pty Ltd
3/26, Day Street North
Silverwater, 2128 NSW
Sydney, Australia
Tel : +612-9666 8883
Fax: +612-9666 8886



VIETNAM
OGAWA Vietnam
171 Nguyen Thi Thap Street
Tan Phu Ward
Dist 7
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : +84 8 3775 3093 / 3775 3094
Fax: +84 8 3775 3095



INDONESIA
PT Healthy World
Lodan Center Block O No 20
Jalan Lodan Raya No 2
Jakarta Utara 14430
Tel : +62 21-6983 1123
Fax: +62 21-6983 1124



Myanmar
Medi Myanmar Group Ltd
No. 46, Pyay Road, 6 ½ mile
Hlaing Township, Yangon 11051
Myanmar
Tel : +95 1-538648
Fax: +95 1-538686



Saudi Arabia
Bed House Est For Trading
Al Mazro Building, Al Hasan Bin Ali
Street Rowdah-2, P.O.Box 85987
Riyadh 11612
Kingdom of Saudi Arabia
Tel : +966 1-4602501
Fax: +966 1-4602577



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО Технологии Здоровья Релакса
140002, Московская область,
г. Люберцы, ул. Колхозная, д.19
Российская Федерация

тел: +7 495-7899174
факс: +7 495-983-34-78



PUTRA
BRAND AWARDS 2010
SILVER
In association with
MALAYSIA'S MOST VALUABLE BRANDS

OGAWA Healthy Lifestyle Chain Store

MALAYSIA . SINGAPORE . INDONESIA . AUSTRALIA . CHINA . VIETNAM . MYANMAR . SAUDI ARABIA

Website • www.ogawaworld.net

РОССИЯ

Website: www.ogawaworld.ru

